



Πάρτε αποτύπωμα.
Ο άξονας θα παραμείνει
στο αποτύπωμα.



Η ειδικά επεξεργασμένη
επιφάνεια του άξονα
εξασφαλίζει πιστή
αναπαραγωγή του
ριζικού σωλήνα.



Επιλέξτε τον διαφανή
άξονα ίδιου χρώματος με
τον άξονα αποτύπωσης.



Κόψτε το επί πλέον μήκος του
άξονα με ένα ζεστό εργαλείο
και δημιουργήστε σημεία
συγκράτησης για το κερί.



Δημιουργήστε το κολόβωμα
με κερί, επενδύστε με
πυρόχωμα και τοποθετήστε
στον φούρνο αποκήρωσης
στους 250 °C για 30 λεπτά
πριν φτάσετε στην τελική
θερμοκρασία.

CEKA REVAX
CEKA SOL
PRECI-HORIX
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-BAR
PRECI-BALL
PRECI-CLIP
PRECI-SAGIX
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX EXTRACORONAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-CLIX RADICULAR RC
PRECI-TUBIX/MORTIX
PRECI-POST
PRECI-PROFILE
PERMA-RET
3C-BOND
EXPANDO
CEKA-MAX

PRECI-POST

PRECI-POST

Prospectus no 261.G-ed.B
Copyright© ALPHADENT NV 6/2011
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV
Textielstraat 24
8790 Waregem, Belgium
tel +32 56 629 100
fax +32 56 629 101
e-mail: info@ceka-preciline.com



Τυποποιημένο σύστημα πλαστικών αξόνων αποτύπωσης PRECI-POST M

2° 30' TAPER



2001

Συσκευασία PRECI-POST:

- 1 κίτρινη φρέζα
- 1 μπλε φρέζα
- 25 αδιαφανείς κίτρινοι άξονες αποτύπωσης
- 25 αδιαφανείς μπλε άξονες αποτύπωσης
- 25 κίτρινοι διαφανείς εργαστηριακοί άξονες
- 25 μπλε διαφανείς εργαστηριακοί άξονες



Προετοιμάστε τον ριζικό σωλήνα με την κίτρινη ή τη μπλε φρέζα.



Δημιουργήστε ένα περιφερειακό βάθρο στην είσοδο του ριζικού σωλήνα. Τελειώνοντας στα όρια των ούλων.



Επιλέξτε τον αδιαφανή πλαστικό άξονα αποτύπωσης ίδιου χρώματος με την φρέζα που χρησιμοποιήσατε.

						
Ø άκρου	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Μήκος κώνου			10,7 mm	12,3 mm		12,3 mm
Ολικό μήκος		14,1 mm	18,6 mm		16,7 mm	22,9 mm
κωδικός						
2001	1 x	25 x	25 x	1 x	25 x	25 x
2002		50 x			50 x	
2002G		50 x				
2002B					50 x	
2003L			50 x			50 x
2003GL			50 x			
2003BL						50 x
2004G	1 x					
2004B				1 x		