



Зніміть відбиток.  
Лікарський штафт  
залишиться в відбитку.



Відбитковий штафт точно  
повторює форму кореневого  
каналу на гіпсовій моделі.



Виберіть прозорий  
(технічний) штафт цього ж  
кольору що був у відбитку.



Сформуйте штафт гарячим  
інструментом, створюючи  
ретенцію для воску.



Відмодельовану конструкцію  
передайте в ливарну  
лабораторію.  
(опоку витримати в муфелі  
30 хвилин при 250 °C)

WWW.CEKA-PRECI-LINE.COM

SWISS MADE



CEKA REVAX  
CEKA SOL  
PRECI-HORIX  
PRECI-VERTIX  
PRECI-VERTIX AT  
PRECI-BAR  
PRECI-BALL  
PRECI-CLIP  
PRECI-SAGIX  
PRECI-CLIX AXIAL  
PRECI-CLIX EXTRACORONAL  
PRECI-CLIX RADICULAR  
PRECI-CLIX RADICULAR RC  
PRECI-TUBIX/MORTIX  
PRECI-POST  
PRECI-PROFILE  
PERMA-RET  
3C-BOND  
EXPANDO  
CEKA-MAX

PRECI-POST

PRECI-POST

CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE



Проспект № 261.0-ed.C  
Copyright© ALPHADENT NV 6/2011  
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV  
Textielstraat 24  
8790 Waregem, Belgium  
tel +32 56 629 100  
fax +32 56 629 101  
e-mail: info@ceka-preciline.com

# ПРЕЦІ-ПОСТ М СИСТЕМА

ТЕХНОЛОГІЯ Д-РА МООЗЕР 2°30'



# 2001

## ПРЕЦІ-ПОСТ НАБІР:

- 1 жовта розгортка
- 1 синя розгортка
- 25 жовтих відбиткових штифтів
- 25 синіх відбиткових штифтів
- 25 жовтих технічних штифтів
- 25 синіх технічних штифтів



Підготуйте кореневий канал відповідною розгорткою: жовтою або синьою.



Відпрепаруйте антиротатційну форму на вході у кореневий канал.



Візьміть відповідний з кольором розгортки штифт.

						
Ø	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Довжина конусу			10,7 mm	12,3 mm		12,3 mm
Загальна довжина		14,1 mm	18,6 mm		16,7 mm	22,9 mm
<b>Арт</b>						
<b>2001</b>	1 x	25 x	25 x	1 x	25 x	25 x
<b>2002</b>		50 x			50 x	
<b>2002G</b>		50 x				
<b>2002B</b>					50 x	
<b>2003L</b>			50 x			50 x
<b>2003GL</b>			50 x			
<b>2003BL</b>						50 x
<b>2004G</b>	1 x					
<b>2004B</b>				1 x		