


# CEKA ATTACHMENTS PRECI-LINE

**PRECI-VERTIX®**



# PRECI-VERTIX


- Εύκολη διαδικασία κατασκευής και συντήρησης
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή των προσθίων για λόγους αισθητικής
- Ελάχιστη συντήρηση
- Χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε οδοντιατρικό κράμα
- Χαμηλού κόστους
- Εξαιρετική άνεση για τον ασθενή
- Περισσότερο από 30 χρόνια κλινικής εμπειρίας

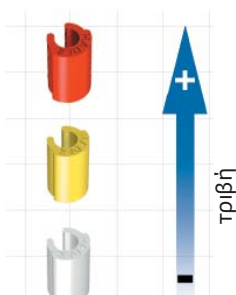

Το PRECI-VERTIX προσφέρει μακροχρόνια συγκράτηση, προστασία από πλαγιολίσθηση και ελάχιστη συντήρηση. Τα πλαστικά θυληκά τμήματα αντικαθίστανται εύκολα και διατίθενται σε 3 διαφορετικά επίπεδα συγκράτησης.




Τοποθέτηση του αρσενικού τμήματος παράλληλα με την φορά ένθεσης. Το αρσενικό τμήμα είναι δυνατόν να μειωθεί καθ' ύψος έως τα 3 mm εάν αυτό είναι απαραίτητο. Συνιστάται η δημιουργία γλωσσικού βάθρου. Χύτευση και φινίρισμα. Τοποθετήστε το κίτρινο πλαστικό θηλυκό πάνω από το αρσενικό, μπλοκάρτε όλες τις υποσκαφές για το ντουμπλάρισμα. Ντουμπλάρτε το εκμαγείο και κερώστε τον μεταλλικό σκελετό.

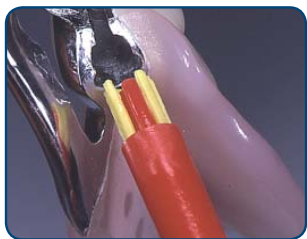

Καλύψτε το ομοίωμα του συνδέσμου με κερί. Επενδύστε με πυρόχωμα και χυτεύσατε. Φινίρετε την εργασία. Μη γυαλίσετε το εσωτερικό τμήμα του μετάλλου. Αφήστε το αμμοβολισμένο. Μειώστε τη μασητική επιφάνεια του αρσενικού κατά 0,2 mm, για να ανακουφίσετε τον σύνδεσμο από μασητικά φορτία. Τοποθετήστε το θηλυκό τμήμα με το εργαλείο τοποθέτησης. Για να το αφαιρέσετε χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό εργαλείο και τραβήξτε έξω το θηλυκό τμήμα.

## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ PRECI-VERTIX HOUSING ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

Μία χυτεύσιμη πλαστική υποδοχή θηλυκού εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή του θηλυκού και εξαιρετική αισθητική.

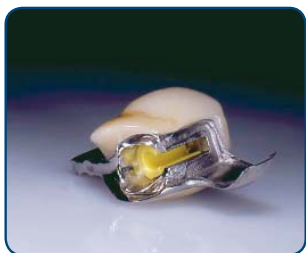

Εφαρμόστε ένα άσπρο πλαστικό θηλυκό μέσα στην υποδοχή (# 1805). Προσαρμόστε την υποδοχή στο σωστό κάθετο ύψος και το περίγραμμα των ούλων.

Προσθέστε γλωσσικό βραχίονα στην υποδοχή.

Διαμορφώστε την υποδοχή για την επένδυση με ακρυλικό ή πορσελάνη για υψηλή αισθητική. Τοποθετήστε αγωγό χύτευσης και αφαιρέστε το λευκό θηλυκό με ένα αιχμηρό εργαλείο. Επενδύστε με πυρόχρωμα και χυτεύσατε.

Διαμορφώστε το δόντι. Ενώστε την προέκταση της υποδοχής στον χυτευμένο μεταλλικό σκελετό με ακρυλικό ή ρητίνη.

## # 1801



### PRECİ-VERTIX STANDARD:

- 6 αρσενικά με ενωματομένο μανδρέν παραλληλισμού
- 6 κίτρινα θηλυκά
- 1 εργαλείο τοποθέτησης θυληκού

## # 1811



### PRECİ-VERTIX P:

- 6 αρσενικά με λοξοτομή για καλλίτερη προσαρμογή και φιλική συμπεριφορά στο περιοδόντιο
- 6 κίτρινα θηλυκά
- 1 εργαλείο τοποθέτησης θυληκού
- 1 μαντρέλ παραλληλισμού


## # 1812



### PRECİ-VERTIX P COMBI:

- 2 αρσενικά με λοξοτομή για καλλίτερη προσαρμογή και φιλική συμπεριφορά στο περιοδόντιο
- 2+2+2 θυληκά
- 2 χυτεύσιμες υποδοχές θυληκού
- 1 μανδρέν παραλληλισμού
- 1 εργαλείο τοποθέτησης θυληκού

## ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

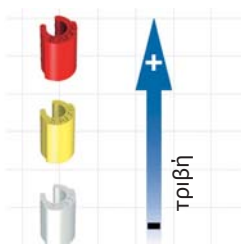

### Αυξημένη τριβή:

- # 1806 6 κόκκινα θηλυκά
- # 1806B 50 κόκκινα θηλυκά

### Κανονική τριβή:

- # 1802 6 κίτρινα θηλυκά
- # 1802B 50 κίτρινα θηλυκά

### Μειωμένη τριβή:

- # 1805 6 λευκά θηλυκά
- # 1805B 50 λευκά θηλυκά

## PRECİ-VERTIX ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΗΛΥΚΟΥ



- # 1808 6 χυτεύσιμες υποδοχές θυληκού
- # 1808B 50 χυτεύσιμες υποδοχές θυληκού

**SWISS MADE**

**CE 0470**

CEKA REVAX

CEKA SOL

PRECI-HORIX

PRECI-VERTIX

PRECI-VERTIX AT

PRECI-BAR

PRECI-BALL

PRECI-CLIP

PRECI-SAGIX

PRECI-CLIX AXIAL

PRECI-CLIX EXTRACORONAL

PRECI-CLIX RADICULAR

PRECI-CLIX RADICULAR RC

PRECI-TUBIX/MORTIX

PRECI-POST

PRECI-PROFILE

PERMA-RET

3C-BOND

EXPANDO

CEKA-MAX

**PRECI-VERTIX®**