

ELABORATION DU PRECI-BALL AVK

1. Modelez les coiffes à tenon radulaire et soudez la partie mâle **1203 C** (voir INFO 048, points 1 à 8).
2. Vissez la partie femelle **1207 A** dans l'anneau de rétention **694 AKS2** (toujours à l'aide du tournevis **IMP-XS-042**) et placez la partie femelle sur la partie mâle.
3. Positionnez la grande cale d'épaisseur **RA 0055**.
4. Polymérisez la partie femelle dans la prothèse.
5. Ajustez la rétention correcte de la prothèse après la finition (voir INFO 053).