

## ELABORATION DE LA LOGETTE PRECI-HORIX

### INCORPORATION D'UNE LOGETTE DANS UN NOUVELLE PROTHESE

1. Faites la construction primaire avec PRECI-HORIX (voir INFO 002).
2. Placez les logettes sur les cavaliers de travail avant l'injection de la résine de la prothèse. Veillez à ce qu'elles se trouvent correctement positionnées. Les logettes sont ainsi polymérisées.
3. Enlevez les cavaliers de travail avec un bistouri après la polymérisation.
4. Placez les cavaliers définitifs avec la rétention désirée en place à l'aide de l'auxiliaire d'insertion **1705**.
5. Pour la sélection du cavalier indiqué, voir INFO 016.

### INCORPORATION D'UNE LOGETTE DANS UNE PROTHESE EXISTANTE

1. Prenez une empreinte avec les cavaliers dans la prothèse.
2. Sectionnez l'analogue de profil **1707** à sa juste longueur, afin de pouvoir le positionner dans l'empreinte. Prévoyez des rétentions du côté basal, qui se trouvera dans le plâtre (avec une fraise ou un disque fin).
3. Coulez un modèle en plâtre dur et enlevez la prothèse. Enlevez le matériau d'empreinte et sortez les cavaliers de la prothèse.
4. Ouvrez la prothèse à la hauteur des cavaliers vers le côté lingual ou palatin.
5. Placez les cavaliers de travail **1703** sur le modèle. (Veillez à ce qu'ils s'adaptent bien sur l'analogue de profil). Eliminez les zones rétentives et placez les logettes sur les cavaliers de travail.
6. Isolez le modèle et repositionnez la prothèse sur le modèle en plâtre.
7. Laissez couler la résine acrylique et polymérisez celle-ci.
8. Enlevez la prothèse après le durcissement et terminez celle-ci.
9. Pressez maintenant les cavaliers désirés en place à l'aide de l'auxiliaire d'insertion **1705**.
10. Pour la sélection du cavalier indiqué, voir INFO 016.