

ELABORATION DU PRECI-TUBIX - PRECI-MORTIX

1. Modelez les couronnes de façon anatomique.
2. Complétez les glissières et fixez la tige de paralléliseur dans le parallélogramme.
3. Enlevez la quantité nécessaire de cire pour incorporer la partie femelle dans le modelage en cire.
4. Placez la glissière en fonction de l'axe d'insertion de la partie secondaire.
5. Fixez la partie femelle et enlevez la partie mâle avec précaution. Mieux vaut raccourcir la glissière après la coulée.
6. Mettez en revêtement et coulez.
7. Sectionnez la tige de paralléliseur avec un instrument chauffé. Posez la partie mâle dans la partie femelle en réalisant quelques rétentions du côté qui sera dans la cire.
8. Modelez la structure en cire des autres couronnes ou éléments de bridge.
9. Enlevez le modelage en cire dans lequel se trouve la partie mâle. Mettez en revêtement et coulez.
10. Un léger polissage de la partie mâle peut diminuer une friction trop importante.