

REBASAGE D'UNE PROTHESE AVEC PRECI-HORIX

1. Prenez une empreinte avec les cavaliers dans la prothèse.
2. Enlevez les cavaliers et remplissez cette cavité avec du plâtre et d'isolant.
3. Coulez un modèle et enlevez le matériau d'empreinte. L'utilisation d'un appareil de rebasage ou d'un moufle est conseillée.
4. Préparez le rebasage comme d'habitude.
5. Après la finition, enclenchez de nouveaux cavaliers dans la prothèse.