

ÉLABORATION DES PROFILS PLASTIQUES PRECI-BAR

1. Prenez une empreinte de la situation en bouche. Modelez les couronnes ou coiffes à tenon radiculaire ou placez sur les analogues d'implants les cylindres calcinables ou pour coulée de raccord.
2. Coupez le profil plastique à la longueur nécessaire et positionnez-le avec la tige de paralléliseur **1100 P/1102 P** entre les coiffes à tenon radiculaire, les couronnes ou les cylindres.
Si vous posez sur le profil une tige de coulée supplémentaire ou un événement, faites-le du côté basal de la barre.
Coulez la construction dans un alliage dur.
Terminez et polissez après la coulée comme d'habitude. Veillez à ne pas enlever trop de métal.
Posez après finition et polissage de la construction coulée les cavaliers respectifs, éliminez les zones rétentives et polymérisez-les dans la prothèse.
Ajustez la rétention après la finition de la prothèse (voir INFO 108).