

REEMPLACER UNE PARTIE FEMELLE PRECI-VERTIX

Tous les emballages PRECI-VERTIX standard **1801** en **1811** sont livrés avec des parties femelles jaunes **1802**.

Si la friction de ces parties femelles ne donne pas entière satisfaction, elles peuvent être remplacées par des parties femelles blanches **1805** avec une friction réduite ou par des parties femelles rouges **1806** avec friction accrue.

1. Coupez la partie femelle avec un bistouri au milieu et enlevez-la de la prothèse.
2. Placez la partie femelle désirée sur l'auxiliaire d'insertion **1804** et positionnez-la en place.
3. Contrôlez si la friction désirée est obtenue.