

SCELLEMENT D'UNE CONSTRUCTION COMBINÉE

La procédure et la précision durant le scellement d'une construction primaire sont d'une importance primordiale. C'est la garantie pour préserver le parallélisme et ainsi la longévité d'une construction combinée.

1. Contrôlez la bonne adaptation de toutes les pièces séparément et ensuite ensemble en bouche.
2. Déposez une petite quantité de vaseline sur les cales d'épaisseur et placez-les sur les boutons-pression.
3. Scellez la construction primaire.
4. Positionnez la prothèse amovible en place et amenez le patient manuellement en relation centrée.
5. Laissez le ciment complètement durcir.
6. Enlevez la construction secondaire et tous les restes de ciment des pièces primaires ou de la construction secondaire.
7. Contrôlez l'enclenchement et la rétention des boutons-pression (voir INFO 059 et INFO 069).