

## REEMPLACER UNE PARTIE FEMELLE PRECI-CLIX

Tous les emballages PRECI-CLIX standard sont livrés avec des parties femelles jaunes **1231**.

Si la rétention de ces parties femelles ne donne pas entière satisfaction, elles peuvent être remplacées par des parties femelles blanches **1232** avec rétention réduite ou par des parties femelles rouges **1233** avec rétention accrue.

1. Pliez vers l'intérieur les segments de la partie femelle avec un instrument aigu (fraise affutée).
2. Forez avec précaution un trou à l'intérieur de la partie femelle (jusqu'à la logette) à l'aide de la fraise au carbure tronconique **IMP-XH-135**.
3. Enlevez la partie femelle avec un instrument aigu.
4. Placez la partie femelle désirée sur l'auxiliaire d'insertion **1222** et pressez-la dans la logette.
5. Contrôlez si la rétention désirée est obtenue.