

TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PRECI-TUBIX - PRECI-MORTIX

1. Modellate delle corone in cera.
2. Assemblate l'attacco ed inserite il mandrino nel parallelometro.
3. Togliete sufficiente cera per l'incorporamento della matrice nella corona pilastro.
4. Parallelizzate l'attacco alla direzione d'inserzione della parte secondaria.
5. Bloccate la matrice con della cera collante e rimuovete cautamente la patrice. Accorciate l'attacco solo dopo la fusione.
6. Rivestite accuratamente e fondete.
7. Tagliate il mandrino con uno strumento caldo. Inserite la patrice nella matrice e praticate nel appendice della patrice delle ritenzioni per il collegamento con la cera.
8. Modellate le rimaneti corone e/o elementi.
9. Togliete dal modello la modellazione in cera portante la patrice. Rivestite e fondete.
10. Quando la frizione risulta troppa, è possibile lucidare leggermente la patrice.