

## TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PERMA-RET

1. Stabilite il punto in cui deve essere applicato il filo PERMA-RET **1602**.
2. Posizionate la fresa **1606** nel manipolo. Praticate nel dente un foro della profondità di ca. 3 mm.
3. Fissate il filo ritentivo nel mandrino per filo **1604**.
4. Avvitare il filo nel foro.
5. Tagliate il filo con una tronchese oppure con un disco alla lunghezza desiderata (ca. 4 mm).
6. Piegate l'estremità del filo o formate un cappio. Esso offre quindi un'ottima ritenzione per la resina.