

SOSTITUIRE UN CAVALIERE PRECI-HORIX

In tutte le confezioni PRECI-HORIX sono forniti i cavalieri gialli standard **1802**.

Se la ritenzione del cavaliere non corrisponde alle esigenze, è possibile sostituirlo con un cavaliere bianco **1805** con ritenzione inferiore o con un cavaliere rosso **1806** con ritenzione maggiore.

1. Tagliate con un bisturi il cavaliere al centro e rimuovetelo dalla protesi.
2. Mettete il cavaliere con la ritenzione desiderata sull'accessorio per l'inserzione **1705** e spingetelo in posizione.
3. Controllate se è stata ottenuta la ritenzione desiderata.