

**RIBASARE O RIADATTARE UNA PROTESI CON PRECI-HORIX**

1. Rilevate un'impronta con i cavalieri nella protesi.
2. Rimuovete i cavalieri dalla protesi e riempite la zona della barra con del silicone ed isolante.
3. Fabbricate un modello di gesso duro. Togliete il materiale d'impronta. Si raccomanda l'utilizzo di un ribasatore o di una muffola.
4. Ribasate come di consueto.
5. Rimuovete il silicone dopo la polimerizzazione. Il cavaliere è ora libero.
6. Ultimate la protesi con dei nuovi cavalieri.