

SOSTITUIRE UNA MATRICE PRECI-VERTIX

In tutte le confezioni PRECI-VERTIX **1801** e **1811** sono fornite le matrici gialle standard **1802**.

Se la frizione della matrice non corrisponde alle esigenze, è possibile sostituirla con una matrice bianca **1805** con frizione inferiore o con una matrice rossa **1806** con frizione maggiore.

1. Tagliate con un bisturi la matrice al centro e rimuovetela dalla protesi.
2. Mettete la matrice con la frizione desiderata sull'accessorio per l'inserzione **1804** allegato e spingetela in posizione.
3. Controllate se è stata ottenuta la frizione desiderata.