

EXPANDO

Tendiguancia universale, intraorale in 3 misure

1. Controllate se il tendiguancia è pulito bene, disinfettato e sterilizzato.

EXPANDO può essere sterilizzato solamente a bassa temperatura con ciclo lungo.
Vedi la tabella del comportamento chimico dei disinfettanti sull'EXPANDO.

2. Scegliete la misura adatta per il paziente da trattare. Le tre misure (1-2-3) si riconoscono ai punti 1, 2 o 3 sul reggilingua.
3. Stringete lo strumento tra pollice ed indice. Il reggilingua deve stare verso il basso.
4. Posizionate il primo lato in modo che il rigonfiamento del braccio poggi sul limite tra labbro e guancia. Stringete lo strumento e posizionatelo sul altro lato.
5. Controllate che il paziente sopporti bene lo strumento e che non iriti né labbra né guancia e lingua.

Comportamento chimico dei disinfettanti sull'EXPANDO

+ RESISTENTE		- NON RESISTENTE
+ SOLUZIONE RESORCIN 1 % PC + MERFEN 2 % + CHLORAMIN 2 %	+ OCTOZON 1 % PC + LYSOFORM 2 % + ODOL 1,5 %	+ MAKTOL 2 % + LYSOROMIN 2 %
- ZEPHIROL - DIMANIN	- TB-LYSOFORM	- DDT