

## BOTTONI A PRESSIONE DA LAVORO

Onde evitare danneggiamenti dei bottoni a pressione durante la lavorazione, esistono nel sistema attacchi CEKA bottoni da lavoro con bassi valori di frizione vale a dire ritenzione minore che sostituiscono durante la costruzione della protesi rimovibile il bottone originale.

Noi offriamo 2 bottoni da lavoro differenti:

- **RE H 1:** per bottoni **RE 0031** per **REVAX M2**  
Utilizzate il cacciavite da laboratorio **RE H 5**.
- **H 1:** per bottoni **694 C** per **REVAX M3**  
Utilizzate il cacciavite da laboratorio **RE H 5**.

I bottoni a pressione vanno forniti insieme con il mantentore di spazio.

Sostituite sempre il bottone da lavoro alla fine del lavoro con il bottone originale (vedi INFO 063).  
Bloccate con il **CEKA BOND** (vedi INFO 069).

**Attenzione:** i bottoni da lavoro sono fabbricati in leghe non preziose.  
Essi **non** devono essere utilizzati **in bocca** del paziente.