

VERWERKING PRECI-BUT

1. Leg de invoerlijn van de prothese vast.
2. Druk de parallelhouder **1902** over de patrix **1904** en plaats ze in de parallellometer.
3. Bevestig de patrix op de stiftwortelkap of in de steeg met was.
4. Bed in en giet.
5. Cementeer de stiftwortelkappen in de mond en neem een afdruk.
6. Plaats de modelanalogen **1906** in de afdruk en giet een hardgipsmodel.
7. Plaats de verwerkingsmatrix **1907** over de modelanaloog en maak een duplicaatmodel in de inbedmassa.
8. Plaats het retentiekorfje **1908** over de replica van de verwerkingsmatrix en kleef deze aan het waspatroon van het frame vast.
9. Bed in en giet.
10. Het retentiekorfje is nu in metaal gegoten en versterkt in aanzienlijke mate de kunststof die over de hulpverankering aangebracht wordt.
11. Werk het frame verder af.
12. Druk de originele matrix **1903** met plaatshouder op de modelanalogen en werk de prothese verder af.