

VERWERKING PRECI-POST

1. Plaats na het voorbereiden van het wortelkanaal met behulp van de gestandaardiseerde wortelkanaalboor **2004G/2004B** de naar kleur corresponderende opake afdrukstift **2002G/2002B** in het kanaal.
2. Neem een afdruk. De stiften zijn voorzien van een retentie, zodat ze in het afdrukmetaal blijven zitten.
3. Maak hiervan een werkmodel.
4. Het heeft geen belang of men galvaniseert of met kunststof werkt, de opake afdrukstift verbindt zich niet met deze materialen.
5. Vervang in het labo de afdrukstift door de transparante labostift **2003GL/2003BL**. Snij hem op lengte en zorg ervoor dat de bovenzijde een klein beetje retentie heeft voor de was.
6. Maak het waspatroon, bed in en giet. Het resultaat is een precies passende stiftwortelkap zonder soldeernaad.