

## **VERWERKING PRECI-TUBIX - PRECI-MORTIX**

1. Maak de anatomische wasmodellatie van de kronen.
2. Stel het attachement samen en bevestig de parallelhouder in de parallellometer.
3. Verwijder zoveel was als nodig is voor het inwerken van de matrix in de pijlerkroon.
4. Plaats het attachement parallel aan de invoerrichting van het secundaire deel.
5. Kleef de matrix vast en neem de patrix voorzichtig uit. Kort het attachement pas na het gieten in.
6. Bed zorgvuldig in en giet.
7. Snij de parallelhouder weg met een heet instrument. Schuif de patrix in de matrix en voorzie de patrix aan de zijkant van enkele retenties voor was.
8. Modelleer het waspatroon van de andere kronen of brucelementen.
9. Verwijder de wasmodellatie waaraan de patrix zich bevindt. Bed in en giet.
10. Bij te hoge frictie kan de patrix lichtjes gepolijst worden.