

<b>REBASEN/RELINEN VAN EEN PROTHESE MET PRECI-HORIX</b>
---

1. Neem een afdruk met de ruiters in de prothese.
2. Verwijder de ruiters en vul deze ruimte op met gips en isoleermiddel.
3. Giet een model en verwijder de afdrudpasta. Het gebruik van een rebasingklem of cuvette is aangeraden.
4. Maak de rebasing verder klaar zoals gebruikelijk.
5. Voorzie de prothese na het afwerken van nieuwe ruiters.