

## EXPANDO

Universele intra-orale wangretractor in 3 afmetingen

1. Controleer of de retractor goed gereinigd, ontsmet en gesteriliseerd is.

EXPANDO kan enkel op lage temperatuur - lange cyclus - gesteriliseerd worden.  
Raadpleeg de tabel i.v.m. reacties op desinfecteervloeistoffen.

2. Selecteer de juiste grootte voor de te behandelen patiënt. De drie groottes (1-2-3) zijn herkenbaar aan de 1, 2 of 3 puntjes die op de tongonderdrukker aangebracht zijn.
3. Span de retractor op tussen duim en wijsvinger met de tongenonderdrukker naar beneden.
4. Plaats een eerste zijde zo, dat de verdikking van de retractorarm op de grens van lip en wang ligt. Span de retractor op en plaats de andere zijde.
5. Controleer of de patiënt het apparaat goed verdraagt en lip, wang noch tong geïrriteerd worden.

### Chemische invloed van ontsmettingsvloeistoffen op EXPANDO

+ DUURZAAM		- NIET DUURZAAM
+ RESORCINEOPLOSSING 1 % PC + MERFEN 2 % + CHLORAMINE 2 %	+ OCTOZON 1 % PC + LYSOFORM 2 % + ODOL 1,5 %	+ MAKTOL 2 % + LYSOROMIN 2 %
- ZEPHIROL - DIMANINE	- TB-LYSOFORM	- DDT