

CEMENTEREN VAN TITAANMATRIXEN

Door het cementeren van attachmenten is de precisie in combinatiewerken de laatste jaren zo verbeterd, dat deze techniek niet meer weg te denken is in herstellingsprocedures zoals het cementeren van matrixen. **CEKA SITE** heeft zich sinds 1985 als hét materiaal bewezen om metalen onderdelen in tandprothesen te cementeren.

CEKA SITE is een anaëroob kleef- en verblokkingsmiddel, dat op alle dentaallegingen gebruikt kan worden. **CEKA SITE** wordt als basismateriaal en catalysator geleverd in spuitjes van elk 2 gram.

Volg nauwkeurig de volgende technische raadgevingen voor een optimaal resultaat.

1. Zorg ervoor dat de te cementeren delen volledig zuiver zijn en een ruw oppervlak vertonen. Plaats ze op het hulpdeel **P 8**.
 2. Zandstraal deze delen daarom met een zo ruw mogelijk materiaal (AlO_2 , tot 200 μ).
 3. Neem **CEKA SITE** uit de koelkast en laat het 2 uur vóór gebruik op kamertemperatuur komen.
 4. Bereid alle nodige onderdelen voor (zie INFO 071 en INFO 072).
 5. Breng uit beide spuitjes een gelijke hoeveelheid **CEKA SITE** - basismateriaal en catalysator - op het mengblok aan.
 6. Meng het materiaal met een zuiver, metalen instrument gedurende 30 sec. door elkaar tot een homogene, lichtgrijze massa.
 7. **CEKA SITE** moet binnen de 90 sec. die op het aanmengen volgen, verwerkt worden.
 8. Breng het materiaal blaasvrij op de te cementeren delen aan.
 9. Completeer alles onder lichte druk.
 10. Na 10 minuten is het materiaal voldoende uitgehard. De resten die op het mengblok achterblijven kunnen niet tot controle dienen.
 11. Overschot aan materiaal hardt niet uit in contact met zuurstof (lucht) en is makkelijk te verwijderen.
- **Veiligheidsinformatieblad** op aanvraag verkrijgbaar bij uw CEKA-dealer.
 - Bewaar **CEKA SITE** in de koelkast (2 tot 8 °C).
 - **Houdbaarheid:** zie datum op verpakking.
 - **Verwerk CEKA SITE op kamertemperatuur.**