

WERKDRUKKNOPPEN

Om te verhinderen dat drukknoppen tijdens de verwerking en vooral bij het solderen beschadigd worden, bestaan er in het CEKA-Attachement-Systeem werkdrukknoppen die met een kleinere frictie-/retentiewaarde de originele drukknop vervangen tijdens het vervaardigen van de uitneembare prothese.

We maken een onderscheid tussen 2 verschillende werkdrukknoppen:

- **RE H 1:** voor alle drukknoppen **RE 0031** voor **REVAX M2**
Gebruik de labosleutel **RE H 5**.
- **H 1:** voor alle drukknoppen **694 C** voor **REVAX M3**
Gebruik de labosleutel **RE H 5**.

De drukknoppen zijn reeds voorzien van een plaatshouder.

Vervang steeds de werkdrukknop op het einde van de verwerking door de originele drukknop (zie INFO 063). Borg met **CEKA BOND** (zie INFO 069).

Opgelet: werkdrukknoppen zijn uit edelmetaalvrije legeringen vervaardigd.
Zij mogen dus **niet in de mond** van de patiënt gebruikt worden.