

VERVANGEN VAN EEN PRECI-CLIX-MATRIX

PRECI-CLIX-attachementen worden met de gele standaardmatrixen **1231** geleverd.

Wanneer de retentie van deze matrix niet voldoet aan de gestelde eisen, kan men ze vervangen door een witte matrix **1232** die minder retentie geeft of door een rode matrix **1233** die meer retentie geeft.

1. Plooi de matrixlippen met een scherp instrument (aangescherpte boor) naar binnen.
2. Boor met een kopsnijdende hardmetaalboor **IMP-XH-135** voorzichtig een gat in het midden van de matrix (tot aan de housing).
3. Verwijder de matrix met een scherp instrument.
4. Plaats de gewenste matrix op de indrukstift **1222** en druk ze in de housing.
5. Controleer of de gewenste retentie bereikt werd.