

VERWERKING VAN PATRIXEN M VAN PRECI-SAGIX

1. Leg de invoerlijn van de prothese vast.
2. Modelleer de kronen en voorzie in de wasmodellatie voldoende ruimte voor de patrix.
3. Maak een linguale afsteuning.
4. Kies de juiste kunststofpatrix **1322** (Mini \varnothing 1,7 mm) of **1372** (Standaard \varnothing 2,2 mm) en plaats deze op de parallelhouder **1300 P**. Het sferische gedeelte van de patrix past in het gegolfde gedeelte van de parallelhouder.
5. Bevestig de patrix met was aan de pijlerkronen. Voorzie voldoende ruimte voor de reiniging met interdentaal borsteltjes.
6. De rugplaat moet volledig in de wasmodellatie opgenomen worden.
7. Verwijder de parallelhouder **1300 P** voorzichtig van de patrix door de gummiring omhoog te schuiven.
8. Breng gietkanalen aan en bereid voor om in te bedden.
9. Bed in, warm voorzichtig op en giet in een edelmetaalvrije legering.
10. Werk de kronen af en breng de kunststof- of porseleinverblending aan.
11. Polijst de patrix zorgvuldig, zonder de afmetingen te veranderen.