

## **ELABORACIÓN DEL PRECI-BALL AVK**

1. Modele las cofias de espiga y suelde la parte macho **1203 C** (véase INFO 048, 1 hasta 8).
2. Atornille la parte hembra **1207 A** en el anillo de retención **694 AKS2** (siempre con la ayuda del destornillador **IMP-XS-042**) y coloque la parte hembra en la parte macho.
3. Posicione el gran mantenedor de espacio **RA 0055**.
4. Polimerice la parte hembra en la prótesis.
5. Ajuste la retención después del acabado de la prótesis (véase INFO 053).