

**ELABORACION DEL PRECI-TUBIX - PRECI-MORTIX**

1. Modele las coronas de modo anatómico.
2. Complete la guía y fije el mandril paralelizador en el paralelómetro.
3. Quite la cantidad necesaria de cera para incorporar la parte hembra en el encerado de la corona pilar.
4. Posicione la guía paralelamente al eje de inserción de la parte secundaria.
5. Fije la parte hembra y quite la parte macho con cuidado. Recorte la parte hembra sólo después del colado.
6. Ponga el revestimiento y cuele.
7. Recorte el mandril paralelizador con un instrumento caliente. Ponga la parte macho en la parte hembra realizando algunas retenciones al lado que irá en la cera.
8. Encere la estructura de la otras coronas o elementos de puente.
9. Quite el encerado en el cual se encuentra la parte macho. Ponga el revestimiento y cuele.
10. El pulido ligero de la parte macho puede disminuir una fricción mayor.