

UTILIZACION DEL PERMA-RET

1. Determine el lugar exacto donde el hilo PERMA-RET **1602** tiene que ser posicionado.
2. Coloque en el micromotor una fresa **1606** para perforar un agujerito en el diente de unos 3 mm.
3. Fije el hilo en el tenedor de hilo **1604**.
4. Atornille el hilo en la cavidad sin presión.
5. Corte el hilo hasta el largo deseado con una pinza o un disco fino. Eso hasta unos 4 mm de largo.
6. Doble la extremidad del hilo o aplástelo. Esta parte servirá de retención para el acrílico.