

## REEMPLAZAR UN CABALLITO PRECI-HORIX

Los envases PRECI-HORIX son suministrados standard con los caballitos amarillos **1802**.

Si la retención de estos caballitos no reúne las exigencias, se podrán ser reemplazados por los caballitos blancos **1805** con una retención reducida o por los caballitos rojos **1806** con una retención fuerte.

1. Corte los caballitos con un bisturi por el medio y quítelos de la prótesis.
2. Coloque el caballito deseado en el auxiliar de inserción **1705** y posícionelos en su sitio.
3. Controle si la retención deseada es obtenida.