

EXPANDO

Retractor de mejilla intraoral en 3 dimensiones

1. Controle si el retractor está bien limpio, desinfectado y esterilizado.

EXPANDO puede ser esterilizado únicamente a una temperatura baja – ciclo largo.
Consulte la tabla sobre los líquidos de desinfección.

2. Seleccione el buen tamaño para el paciente para tratar. Los tres tamaños (1-2-3) son reconocibles por los 1, 2 o 3 puntos que están al opresor de la lengua.
3. Tense, entre pulgar y índice, el retractor de la lengua abajo.
4. Posicione primeramente un lado de modo que la parte la más gruesa del brazo del retractor estriba al la comisura de los labios. Tense el retractor y posicione el otro lado.
5. Controle si el paciente soporta bien el aparato y que el labio, la mejilla y la lengua no son irritados.

Influencia química de líquidos de desinfección sobre EXPANDO

+ DURADERO		- INDURADERO
+ SOLUCION RESORCINE 1 % PC + MERFEN 2 % + CLORAMINE 2 %	+ OCTOZON 1 % PC + LYSOFORM 2 % + ODOL 1,5 %	+ MAKTOL 2 % + LYSOROMIN 2 %
- ZEPHIROL - DIMANINE	- TB-LYSOFORM	- DDT