

REEMPLAZAR UN MACHO REMOVIBLE

Destornillar un macho puede ser necesario para un control simple o para una reparación. Siga el mismo procedimiento, incluso si el macho tiene que ser reemplazado posteriormente.

REEMPLAZAR UN MACHO EN BOCA DEL PACIENTE

El auxiliar el más indicado para todos los machos es la parte en forma de cruz del auxiliar **A 1** o **RE H 5**.

1. Limpie el macho al aire comprimado (o comparable), para permitir a la cruz del auxiliar de empujar hasta el fondo entre las láminas del macho. Esto evita la fractura o el torcimiento de las láminas destornillando.
2. Posicione la parte sobresaliente del cruz del auxiliar de modo inclinado entre dos láminas, antes de posicionarla completamente sobre la cabeza.

Un macho del cual son rotas varias láminas puede ser destornillado si se sigue escrupulosamente el procedimiento siguiente.

1. Corte las láminas restantes hasta una altura igual.
2. Repase en la base del macho una ranura con la fresa hueca **RE H 21**.
3. Tome un destornillador en acero endurecido.
4. Destornille la parte restante del macho.

REEMPLAZAR UN MACHO EN UNA PRÓTESIS

1. Controle si se trata seguro de un macho removible.
2. El auxiliar el más indicado es la llave de laboratorio **RE H 5**.
3. Limpie el macho al aire comprimado o en un baño ultrasónico, para permitir a la cruz del auxiliar **RE H 5** de empujar hasta el fondo entre las láminas del macho. Esto evita la fractura o el torcimiento de las láminas destornillando.
4. Posicione la parte sobresaliente de la cruz del auxiliar **RE H 5** de modo inclinado entre 2 láminas, antes de posicionarla completamente sobre la cabeza.
5. Destornille el macho girando hacia la izquierda.

Fije el macho reposicionado o reemplazado con el adhesivo **CEKA BOND** (véase INFO 069).