

MACHOS DE TRABAJO

Para evitar que los machos se dañan durante la elaboración, existen machos de trabajo en el sistema de ataches CEKA, con un valor de fricción/retención reducido para reemplazar el macho original durante la elaboración de la prótesis removible.

Hacemos una distinción entre 2 machos de trabajo diferentes:

- **RE H 1:** para todos los machos **RE 0031** para **REVAX M2**
Utilice la llave de laboratorio **RE H 5**.
- **H 1:** para todos los machos **694 C** para **REVAX M3**
Utilice la llave de laboratorio **RE H 5**.

Los machos son siempre suministrados con un mantenedor de espacio.

Reemplace siempre el macho de trabajo al final de la elaboración por el macho original (véase INFO 063). Bloquee con el adhesivo **CEKA BOND** (véase INFO 069).

Atención: los machos de trabajo son fabricados en aleaciones no preciosas.
Entonces **no podran ser utilizados en boca** del paciente.