

## ELABORACIÓN DE UNA PARTE MACHO P DEL PRECI-SAGIX

1. Determine el eje de inserción de la prótesis.
2. Seleccione la parte macho apropiado **1321** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) o **1371** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm) y colóquela sobre el mandril paralelizador **1300 P**. La parte esférica de la parte macho se adapte en la parte ondulada del mandril paralelizador.
3. Fije la parte macho con cera a las coronas pilares. Controle se hay suficiente espacio para la limpieza con los cepillos interproximales.
4. Quite el mandril paralelizador **1300 P** de la parte macho, deslizando el aro de goma hacia arriba.
5. Coloque los bebederos y prepara todo para el revestimiento.
6. Ponga el revestimiento, precaliente con cuidado y cuele con una aleación dura. No utilice un revestimiento para la técnica de precalentamiento rápido.
7. Arene el colado sin dañar la parte macho.